

De Inclusieve Fietsen van De Kleppe

In 2025 startte De Kleppe een project om gasten van het vakantiecentrum met een motorische beperking de mogelijkheid te bieden om door middel van aangepaste fietsen mee uitstappen in de regio van de Vlaamse Ardennen te maken. Momenteel hebben we drie verschillende fietsen ter beschikking.

De Driewieler Duo Fun2Go

De **Duo Fun2Go** fiets is een speciale tandem met drie wielen. Omdat je naast elkaar zit en niet achter elkaar wordt deze fiets ook wel 'side-by-side tandem' genoemd. Op de duo-fiets is er 1 persoon die de fiets bestuurt en remt. De passagier die naast de bestuurder zit kan wel mee trappen maar niet sturen of remmen. Met elektrische trapondersteuning en voetenbakjes. Draaibare stoel, heupriem en armleuning passagier.

Kenmerken

- Bestuurder en passagier zitten naast elkaar
- Geen instap, eenvoudig plaats nemen, draaibare stoel voor passagier
- Heupriem voor passagier en vast voetenbakje beschikbaar
- Comfortabele verstelbare zittingen met rugleuning,
- Meesturende achterwielen zorgen voor korte draaicirkel
- 8 versnellingen en trapondersteuning door elektro-motor
- Sterke fiets, max. 280 kg per fiets



De Rolstoelfiets Veloplus

Met de **VeloPlus** rolstoelfiets is er geen transfer nodig tussen de rolstoel en de fiets. Zonder tillen of veel krachtsinspanning wordt de passagier met rolstoel op het kantelplateau van de fiets gereden. De passagier blijft dus in de eigen rolstoel zitten om per fiets vervoerd te worden

Kenmerken

- Rolstoelgebruiker kan in eigen rolstoel blijven zitten
- Geschikt voor vrijwel elke **handbewogen rolstoel**, tot max.74 cm breed
- Eenvoudig oprijden van rolstoel dankzij de kantelbare oprijplaat en elektrische lier
- Rolstoelvergrendeling en voetenbakje
- Breed geplaatste en extra meesturende wielen voor verkorte draaicirkel en stabiliteit
- Stabiel en veilig
- Trapondersteuning door elektromotor



De Twinny Tandem

Bij de **Twinny Tandem** is op- en afstappen eenvoudig door de ruime lage instap. Er is meer ruimte gecreëerd tussen beide passagiers. Je kan zelf bepalen hoe je samen fietst, zo kan je door de dubbele vrijloop onafhankelijk van elkaar trappen.

Kenmerken

- Bestuurder vooraan
- Lage instap en extra ruimte tussen beide personen
- 8 versnellingen en trapondersteuning door elektro-motor
- Hydraulische rem en parkeerrem
- Snelspanner op zadels



De eerste maal

Een aangepaste fiets fietst anders dan een reguliere fiets. Voordat je gaat fietsen kun je best vooraf oefenen op de fiets. Fiets eerst een klein stukje in de buurt, oefen met op- en afstappen en oefen met bochten. Meer zelfvertrouwen op de fiets resulteert in meer fietsveiligheid.

Hoeveel kilometer met de opgeladen accu van een elektrische fiets?

Er zijn vele factoren die de actieradius van de e-bike bepalen: je eigen krachtinspanning, het totaalgewicht, het profiel van de route, het weer, enz. De geschatte gemiddelde **actieradius van de Duo Fun2Go is 40 km, van de Veloplus is 60 km, van de Twinny Tandem is 70 km.**

Les vélos inclusifs chez De Kleppe

En 2025, le centre de vacances De Kleppe initia son projet des vélos inclusifs afin que nos visiteurs à mobilité réduite aient la possibilité de participer à des excursions dans la région des Ardennes flamandes. Actuellement, nous avons trois vélos inclusifs à disposition.

Le Tricycle Duo Fun2Go

Le tricycle **Duo Fun2Go** est un tandem à trois roues. Les cyclistes se retrouvent côte à côte. Ce tandem avec son assistance électrique se fait contrôler par la personne qui conduit et freine. Le passager peut pédaler, mais pas conduire ou freiner. Il dispose d'un siège pivotant, d'une ceinture, d'un repose-pieds et d'accoudoirs pour le passager.



Caractéristiques

- Conducteur et passager coude à coude
- Embarquement aisé et siège pivotant pour le passager
- Repose-pieds fixes
- Sièges à dossiers ajustables et confortables avec ceinture pour le passager
- Roues arrière pivotantes pour un rayon de braquage réduit
- Dérailleur 8 vitesses
- Assistance électrique par moteur électrique
- Vélo résistant, max. 280 kg

Veloplus, le vélo pour fauteuil roulant

Avec le **Veloplus**, il n'y a plus de transfert nécessaire entre la chaise roulante et le vélo. Le passager est transporté dans sa propre chaise roulante. Sans devoir être soulevé et avec très peu d'effort, le treuil électrique incorporé et le plateau inclinable aident à la montée du passager.



Caractéristiques

- L'utilisateur ne quitte pas son fauteuil roulant
- Approprié pour **fauteuil roulant manuel** (jusqu'à 74 cm de largeur)
- Accès facile par plateau inclinable et treuil électrique
- Verrouillage facile du fauteuil roulant sur le plateau
- Rayon de braquage réduit grâce aux roues avant pivotantes
- Stabilité et sécurité
- Assistance électrique par moteur électrique

Le Twinny Tandem

Contrairement au tandem classique, la montée et descente du **Twinny Tandem** est aisée et facile. Plus de confort grâce à l'espacement accru entre le siège passager à l'avant et le guidon du convoyeur. La possibilité de point mort pour les deux roues permet la flexibilité dans le mode de pédaler.

Caractéristiques

- Conducteur à l'avant
- Plus d'espacement
- Montée basse pour les deux utilisateurs
- Dérailleur 8 vitesses
- Assistance par moteur électrique
- Frein hydraulique
- Selles ajustables



La première fois

Un vélo inclusif s'utilise différemment d'un vélo régulier. Avant de l'utiliser pour des distances prolongées un essai est recommandé. Faites un petit tour dans le voisinage pour apprendre à prendre les virages. Essayez la montée et la descente des vélos. L'expérience vous donnera plus d'aplomb et plus de sécurité routière.

Combien de kilomètres peut-on parcourir avec la batterie d'un vélo électrique ?

Plusieurs facteurs influencent le rayon d'action du vélo électrique : l'effort physique rendu, le poids total, le profil de la route, les conditions climatiques, etc. **Le rayon d'action moyen estimé du Duo Fun2Go est de 40 km, celui du Veloplus est de 60 km et celui du Twinny Tandem est de 70 km.**